



< 使用方法 >

1. 開總開關前先確認微調開關是否是閉緊，口罩導管是否接受。
2. 打開總開關之後，再將微調開關調至病人適合的流速即可。

< 安全措施 >

鋼瓶瓶頭會有一個安全弁，所謂安全弁就是當鋼瓶過熱氣體膨脹至設定壓力，安全弁內有銅片會破裂，氣體在瞬間會排掉，並不會有任何的危險，只需通知氣體公司更換安全弁內銅片再充填即可。



TEL:(04)2282-1906 FAX:(04)2280-3050

台中市東區立德東街19號