



< 使用方法 >

1. 將流量錶與鋼瓶用扳手鎖緊。
2. 口罩(或鼻管)接在氧氣出口處。
3. 打開氧氣鋼瓶總開關。
4. 壓力錶會顯示氣體存量。
5. 依使用者需求旋轉黑色流量旋鈕至需要的流量大小(流量視窗指示可調 0,1/2,1,.....15)。
6. 結束使用時，關住鋼瓶總開關，將剩存在流量表內殘氣洩掉，再將流量視窗調為 0 即可。



東洋氣體有限公司

TEL:(04)2282-1906 FAX:(04)2280-3050

台中市太平區合利街20號

```

var topDoc = window;
var message = topDoc.
$.message;
$.message.style.d

$.fn = function()

hideMessage);
var topDoc = window.top

<?
//we need to refresh the drop dir
//save the current dir, delete all
//add the new list, re-select the
$.refreshDir)

$.dirs = $manager->getD
var selection = topDoc.g
var currentDir = selection

while(selection.length >
{
selection.remove

selection.options[selectio
<? foreach($dirs as $relat
selection.options[selectio
<?]?>

for(var i = 0; i < selection
{
var thisDir = selectio
if(thisDir == curre

selection.s
break;
}
}

<?}?>

function editImage(image)

```