


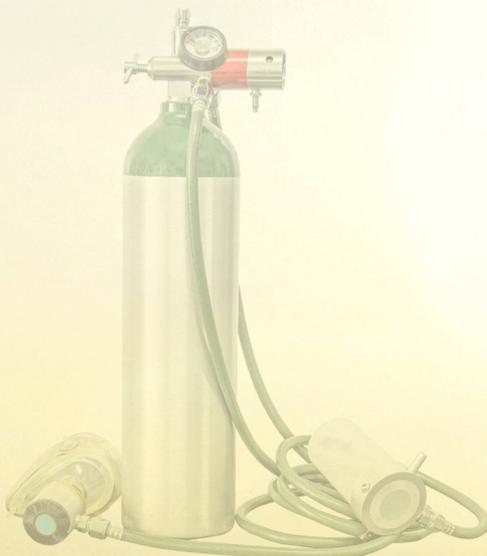

< 使用方法 >

1. 將流量錶與鋼瓶用扳手鎖緊。
2. 口罩(或鼻管)接在氧氣出口處。
3. 打開氧氣鋼瓶總開關。
4. 壓力錶會顯示氣體存量。
5. 依使用者需求旋轉黑色流量旋鈕至需要的流量大小(流量視窗指示可調 0,1/2,1,....15)。
6. 結束使用時，關住鋼瓶總開關，將剩存在流量表內殘氣洩掉，再將流量視窗調為 0 即可。



TOYO GAS
東洋氣體有限公司

TEL:(04)2282-1906 FAX:(04)2280-3050
台中市東區立德東街19號